


2. 車いす編

(2) お手伝いのポイント、気をつけること

① 車いすの各部位の説明

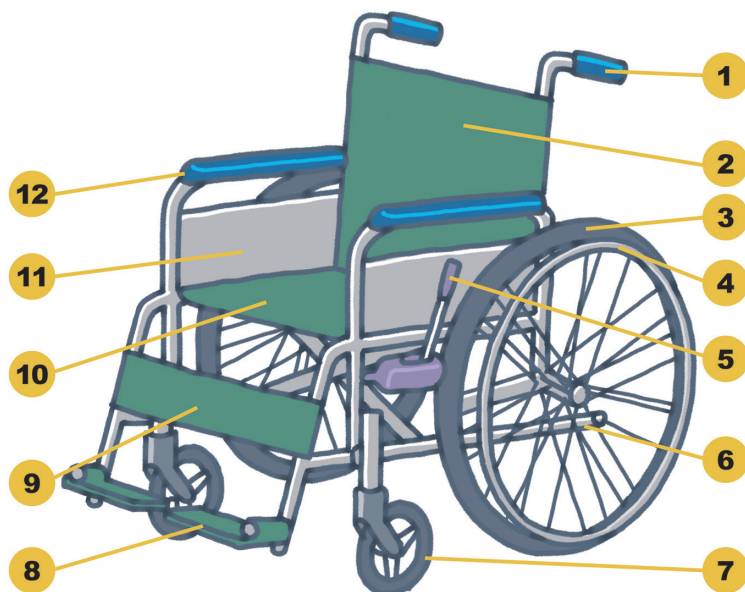

- ① ハンドグリップ……………介護者用のにぎり
- ② バックレスト……………背もたれ
- ③ 大車輪……………後輪
- ④ ハンドリム……………ここに手をかけ車輪を回す
- ⑤ ブレーキ……………停車中に走り出さないためのもの
- ⑥ ステッピングバー……………介助者がキャスター上げをする時に使う
- ⑦ キャスター……………前輪、空気入りのものもある
- ⑧ フットレスト……………足をのせる部分
- ⑨ レッグレスト……………足が後ろへ落ちないように
- ⑩ シート……………クッションをのせて使うことが多い
- ⑪ スカートガード……………衣服等が外へ落ちないように
- ⑫ アームレスト……………ひじかけ、取り外し式もある

2. 車いす編

(2) お手伝いのポイント、気をつけること

② 基本的な操作方法

● ひろげ方




〈1〉ブレーキをかける。
外側に少し開く。

〈2〉両手をシート面に
あてて、押しひろげる。

〈注意〉このようにシートの横に
手を入れると指をはさまれます。

ひろげる時の手の向き

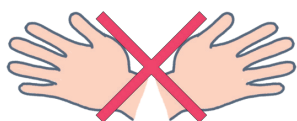

手を外側に向けた
ままだと指を挟んで
しまう危険がある。



内側に向けていれば
指は挟まない。

● たたみ方



〈1〉ブレーキをかける。フットレスト(足台)を上げる。

〈2〉シートを持ち上げる。

〈3〉完全におりたたむ。